

## Bruksanvisning

**Effigerm Baby Care passar för sårtvätt, rengöring, sköljning och fuktning av sår, som även förhindrar bildning av biofilm. För användning på intakt hud vid blöjutslag/blöjdermatit, skrubbsår, mindre skärsår, småsår och mindre brännskador.**

### 1. Produkt, sammansättning och användning

Effigerm Baby Care är enkel att använda och appliceras på det önskade området med spray. Lösningen är en dermatologiskt testad, elektrolyserad oxiderande vattenlösning, känd som Hypoklorsyra.

Användningsområden:

- För blöjutslag/blöjdermatit, skrubbsår, mindre skärsår, småsår och mindre brännskador
- Rensning och debridering av sår och för att förebygga infektioner
- För att skölja och fukta sår
- För sår och irriterad hud
- Förebygger biofilm
- Kan användas för att fukta sårförband, fukta såret och för att lösa förband som fastnat i såret
- Skölja och avlägsna främmande föremål från såret

### 1.1 Verkningsmekanism

Effigerm Baby Care är en elektrokemiskt modifierad konserverad hydrogel med hypoklorsyra. Dess huvudsakliga uppgift är att förändra sårmiljön genom mekanisk eliminering av främmande objekt som kan orsaka hudirritation och infektion. Samt att sörja för en optimal miljö avseende fuktighetsgrad, syre och pH-värde för att påskynda läkningsprocessen. Sprayen är alkoholfri och behöver inte sköljas av. Kan användas från födseln.

### 1.2 Ingredienser

**Varje flaska Effigerm Baby Care innehåller:**

- 0,016% hypoklorsyra HOCl
- Hjälpmämen: Joniserat vatten, Natriumklorid, Natriummagnesiumfluorsilikatgel, Mononatriumfosfat

### 2. Förpackning

Den medicintekniska produkten finns i 150 ml flaska med spray.

### 3. Dosering och användningssätt

Applicera Effigerm Baby Care på det drabbade området för att skölja området och därigenom ta bort främmande partiklar. Applicera vid behov för optimal modifiering av sårmiljön.

### 4. Bieffekter

I sällsynta fall kan en stickande känsla uppstå.

### 5. Interaktioner

Inga kända interaktioner.

### 6. Förvaring

**Effigerm Baby Care ska förvaras mellan 4-25°C.** Undvik direkt värme och solljus. Häll ej över i annan behållare. Sätt på korken efter varje användning. Förvaras oätkomlig för barn.

### 7. Varningar och försiktighetsåtgärder

Använd inte Effigerm Baby Care vid känd överkänslighet eller intolerans mot någon ingrediens. Vid osäkerhet rådfråga din läkare innan användning. Klassificerad som medicinteknisk produkt. Alkoholfri.

För bästa effekt, låt sprayen lufttorka efter applicering.

Får ej förtäras. Endast för utvärtes bruk.

Används ej i mer än 30 dagar. Samtidig användning av produkten med läkemedel bör ske i samråd med sjukvården. Effigerm kan användas från födseln.

### 8. Utgångsdatum

Använd ej efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet gäller endast när Effigerm förvaras i intakt originalbehållare.

### 9. Avfall

Produkten kasseras i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering. Flaskan sorteras som plast och kartongen som papper.

### Tillverkad av:

CF Pharma Ireland Ltd  
Unit 73B Hebron Ind Est  
Kilkenny, Ireland  
[www.effigerm.com](http://www.effigerm.com)

### Distribuerad av/Marknadsförs av:

Nordic Consumer Health AB  
Box 1183, 131 27 Nacka Strand, Sverige

### Konsumentkontakt:

+ 46 8 716 36 55  
[info@consumerhealth.se](mailto:info@consumerhealth.se)  
[www.effigermbabycare.se](http://www.effigermbabycare.se)

Effigerm Baby Care spray är en CE-certifierad medicinteknisk produkt (MD).

Senast reviderat: 2025-03



**Effigerm Baby Care er velegnet til sårvaske, rensning, skylning og fugtning af sår, hvilket også forhindrer/forebygger dannelsen af biofilm.**

**Til brug på intakt hud ved bleudslæt/blederdermatitis/bleieutslett/bleiederematitt, hudafskrabninger/skrubbsår, mindre snitsår/kutt, mindre sår og mindre forbrændinger/brannskader.**

### 1. Produkt, sammensætning og anvendelse

Effigerm Baby Care er nem at bruge og påføres det ønskede område med en spray. Opløsningen er en dermatologisk testet, elektrolyseret oxiderende/oksiderende vandig opløsning kendt/kjent som hypoklorsyre.

Anvendelsesområder/Bruksområder:

- Ved bleudslæt/blederdermatitis/bleieutslett/bleiederematitt, hudafskrabninger/skrubbsår, mindre snitsår/kutt, mindre sår, mindre forbrændinger/brannskader og intakt hud
- Rengøring og debridering af sår og for at forebygge infektioner/infeksjoner
- Til at skylle og fugte sår
- Til sår og irriteret hud
- Forhindrer biofilm
- Kan bruges til at fugte sårbandager/sårbandasjer, fugte såret og til at løsne bandager, der sidder fast på såret
- Skyl og fjern fremmedlegemer fra såret

### 1.1 Virkningsmekanisme

Effigerm Baby Care er en elektrokemisk/elektrokjemisk modificeret konserveret hydrogel med hypoklorsyre. Dens hovedopgave er at ændre sår miljøet gennem mekanisk eliminerende af fremmedlegemer, der kan forårsage hudirritation/hudirritasjon og infektion/infeksjon. Samt at give et optimalt miljø med hensyn til fugt, ilt/oksygen og pH-værdi for at fremskynde helingsprocessen. Gelen er alkoholfri og skal ikke skylles af. Kan bruges/brukes fra fødslen/fødselen.

### 1.2 Ingredienser

**Hver flaske Effigerm Baby Care indeholder:**

- 0,016% hypoklorsyre HOCl
- Hjælpstoffer: Ioniseret vand, Natriumchlorid, Natriummagnesiumfluorosilikatgel, Mononatriumphosphat

### 2. Emballage/Emballasje

Det medicinske/medisinske udstyr/utstyret fås/er tilgængelig i en 150 ml flaske med spray.

### 3. Dosering og anvendelsesmåde/brugsåtte

Påfør Effigerm Baby Care på det berørte område/området for at/å skylle området og derved fjerne fremmede partikler. Påfør efter/etter behov for optimal modifikation/modifisering af/av sår miljøet.

### 4. Bivirkninger

I sjældne tilfælde/sjældne tilfeller kan der opstå en prikkende fornemmelse/følelse.

### 5. Interaktioner/Interaksjoner

Ingen kendte interaktioner/interaksjoner.

### 6. Opbevaring

**Effigerm Baby Care bør opbevares mellem**

**4-25°C.** Undgå direkte varme og sollys. Hæld ikke i en anden beholder. Sæt hæften på igen efter hver brug. Opbevares utilgængeligt for børn/barn.

### 7. Advarsler og forholdsregler/forsigtighedsregler

Brug ikke Effigerm Baby Care i tilfælde af kendt overfølsomhed eller intolerance over for nogen komponent/innholdsstoffene. Kontakt sundheds-væsenet/helsepersonell, hvis du har spørgsmål. Klassificeret som medicinsk udstyr. Alkoholfri. For den bedste effekt, lad gelen lufttørre/lufttørke. Effigerm Baby Care må ikke indtages/inntas. Kun til uadvortes brug. Må ikke bruges i mere end 30 dage. Samtidig brug af produktet med lægemidler bør ske i samråd med sundhedsvæsenet/helsevesenet. Effigerm kan bruges fra fødslen/fødselen.

### 8. Udløbsdato

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på emballagen/emballasjen. Udløbsdatoen gælder kun, når Effigerm opbevares i en intakt original beholder.

### 9. Affald/Avfall

Produktet skal bortskaffes/destrueres i overensstemmelse/henhold med lokale regler for affaldsbortskaffelse/avfallshåndtering. Flasken sorteres som plast, og kartonen/kartongen som papir.

### Fremstillet af/Producert av:

CF Pharma Ireland Ltd, Unit 73B Hebron Ind Est, Kilkenny, Ireland, [www.effigerm.com](http://www.effigerm.com)

### Distribueret af/ Distribuert av:

Nordic Consumer Health AB  
Box 1183, 131 27 Nacka Strand, Sverige

### Forbrugerkontakt/Forbrukerkontakt:

+ 46 8 716 36 55  
[info@consumerhealth.dk](mailto:info@consumerhealth.dk)  
[info@consumerhealth.no](mailto:info@consumerhealth.no)

Effigerm Baby Care spray er et CE-certificeret/CE-sertifisert medicinsk/medisinsk udstyr (MD).

Sidst/Sist revideret/revidert: 2025-03



0426

